

Mode d'emploi du rollateur LR 53/56



Chère utilisatrice, cher utilisateur,
 nous vous félicitons d'avoir acheté un produit de notre maison, techniquement sophistiqué et conçu selon les dernières avancées technologiques. Le mode d'emploi décrit la préparation, le fonctionnement, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du produit. Il sert ainsi de base d'action à l'utilisateur pour une utilisation sûre et sans risque de votre rollator. Afin de profiter pleinement de l'utilisation et d'éviter des situations dangereuses, lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez-le à portée de main. Les modèles LR53 et LR56 se distinguent uniquement par la hauteur d'assise. Pour le reste, les deux modèles sont identiques en termes de construction et d'équipement.

Consignes de sécurité

Avant la première utilisation, lisez entièrement le mode d'emploi. Avant la première utilisation, nous vous recommandons de vous entraîner à utiliser votre rollator sur un terrain plat et connu afin d'éviter les situations à risque.

- Avant toute utilisation, assurez-vous que votre rollator est intact et que toutes les pièces réglables sont correctement fixées.
- Vérifier le bon fonctionnement des freins.
- Veillez à ce que le dossier soit bien fixé.
- Notez que sur un terrain en pente, la vitesse de roulement peut être supérieure à votre propre vitesse de marche. Risque de chute !
- Le déambulateur ne peut être utilisé que comme aide à la marche d'une personne.
- Le transport de charges ou de personnes n'est pas autorisé.
- Le risque de basculement peut être augmenté en cas de déséquilibre dû aux mouvements du corps en position assise ou au chargement (panier à provisions).
- Lors du pliage, des parties de vêtements ou de corps peuvent être coincées.
- N'utilisez pas d'appareils de nettoyage à haute pression ni de produits chimiques corrosifs et agressifs pour le nettoyage.

Description du déambulateur



Poignée Frein
 Dossier Panier
 de rangement
 Roues de
 course
 Roues
 directrices

Indication

Le déambulateur sert d'assistance aux personnes à mobilité réduite lors de la marche, par exemple à domicile ou à l'extérieur. Le siège permet à l'utilisateur de se reposer ou de faire une pause lors de longs trajets.

Contre-indication

L'utilisation du déambulateur n'est pas indiquée en cas de

- Troubles de la perception
- de graves troubles de l'équilibre
- Incapacité de s'asseoir

Monter les poignées et régler la hauteur

Le rollator est livré en grande partie pré-monté
 Retirez les vis et les écrous-étoiles du cadre Insérez les poignées dans le guide tubulaire du cadre Positionnez les poignées à la hauteur souhaitée les poignées sont correctement réglées lorsque vous vous trouvez à la hauteur des poignets Fixez la hauteur réglée en insérant les vis et en serrant bien l'écrou-étoile. les poignées soient à la même hauteur



Monter le panier d'achat

Pour monter le panier à provisions, accrochez-le au cadre à l'aide des crochets existants Ne transportez pas de charges trop importantes Notez que les charges élevées augmentent le risque de basculement.



Monter le dossier

Réglage des freins

Le dossier ne doit être monté que lorsque le rollator est en position de sécurité et que les freins sont actionnés Prenez le dossier et enfoncez les clips à droite et à gauche avec l'index
Faites glisser le dossier dans le guide Veillez à ne pas le coincer
Pour retirer le dossier, procédez dans l'ordre inverse.



La force du frein peut être réglée individuellement
Pour ce faire, dévissez les écrous moletés se trouvant sur le câble Bowden (frein plus dur) ou vissez-les (frein plus souple).
Les patins de frein ne doivent pas entrer en contact avec la roue sans être actionnés.



Freins d'arrêt

Pour actionner le frein de stationnement, poussez le levier de frein vers le bas
Pour le desserrer, actionnez le frein comme d'habitude Attention ! N'actionnez jamais le frein de stationnement en mouvement.



Freiner à partir du mouvement

Pour réduire la vitesse à partir de la marche, actionnez le levier de la poignée Tirez la poignée vers vous avec les doigts



Mise en place

Positionnez votre rollator devant vous et actionnez les freins Le rollator se déploie en exerçant une légère pression sur les poignées Poussez la barre transversale vers le bas et rabattez l'assise vers le bas Vous pouvez maintenant accrocher le panier comme indiqué



Pliage

Pour transporter ou ranger votre rollator en économisant de la place, vous pouvez le plier Retirez d'abord le panier Rabattez le siège vers le haut et tirez la barre transversale vers le haut Le déambulateur va en le pliant



Nettoyage / désinfection

Le rollator doit être nettoyé régulièrement. La désinfection doit être effectuée au moins lors du changement de patient.
Les parties du cadre peuvent être essuyées avec un chiffon humide. En cas de salissures plus importantes, vous pouvez utiliser un produit de nettoyage doux. Les roues peuvent être nettoyées à l'aide d'une brosse humide avec des poils en plastique (attention ! Pas de brosse métallique)

) Pour désinfecter les poignées ainsi que le siège, utilisez un produit de nettoyage de surface disponible dans le commerce.

Données techniques

Réutilisation

Le rollator est prêt à être réutilisé. Veuillez noter que vous devez également prendre en compte tous les éléments nécessaires à une utilisation sûre.
Les documents techniques nécessaires à la gestion de l'équipement doivent être remis au nouvel utilisateur.
Le déambulateur doit être nettoyé et désinfecté avant d'être transmis et doit être contrôlé par le commerce spécialisé pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et le valider.

Entretien

Assurez-vous que toutes les pièces du rollator fonctionnent correctement. Vérifiez que les vis de fixation du siège sur le tube d'appui sont bien serrées. Si ce n'est pas le cas, serrez les vis. Vérifiez que toutes les fermetures enfichables et rapides sont correctement réglées et complètement enclenchées. Vérifiez que tous les boutons des fermetures rapides et enfichables peuvent être desserrés et fixés sans problème. Les pièces cassées, endommagées ou usées du rollator doivent être remplacées immédiatement.

Garantie

La garantie correspond aux 24 mois prescrits par la loi à compter de la date d'achat. Les prestations de garantie comprennent les défauts du produit dont il est prouvé qu'ils sont dus à des vices de matériel ou de fabrication. Sont exclus de la garantie les dommages dus à l'usure naturelle, à une faute intentionnelle, à une manipulation ou une utilisation négligente ou incorrecte. La garantie est également annulée en cas d'utilisation de produits de nettoyage inappropriés, huiles de lubrification ou graisses. Sont exclus de la garantie les pièces d'usure telles que les pneus / les câbles au sol / les plaquettes de frein, etc.

Rollateur LR 53/56

Pneus	Pneus PU
Matériau	Cadre en aluminium (laqué) Assise et dossier rembourrés PU
Couleur	argent
Hauteur d'assise (cm)	53 / 56
Hauteur des poignées de poussée (cm)	79 - 90
Largeur totale (cm)	60
Longueur totale (cm)	76
Hauteur totale (cm)	90
Poids (kg)	7,5
Charge utile du panier (kg)	3
Capacité de charge maximale (kg)	120

Frohling 24

33106 Paderborn

Allemagne

Téléphone : +49 (0) 5254-9359-0

Télécopieur : +49 (0) 5254-9359-29

E-mail : info@trendmobil.com

Internet : www.trendmobil.com

