

Hygiène et entretien

Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection hospitalière.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS

Produits prohibés Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Selon modèle :


- sangles auto-agrippantes « velours », lavable à 30° ;
- sangles tissus lavables à 60°, séchage à 60°.

Réf.	Description
DEBARLI90	• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg
DEBARLI140	• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg
DEBARLI200	• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg
DEBARLIXXL	• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2,45 kg
DEBARCOUL90	• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg
DEBARCOUL140	• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg
DEBARCOUL200	• 68 x 42 x 32 cm • Poids : 2 kg



Barre latérale CANOLI®

Barre Latérale
Canoli®
Mars 2011

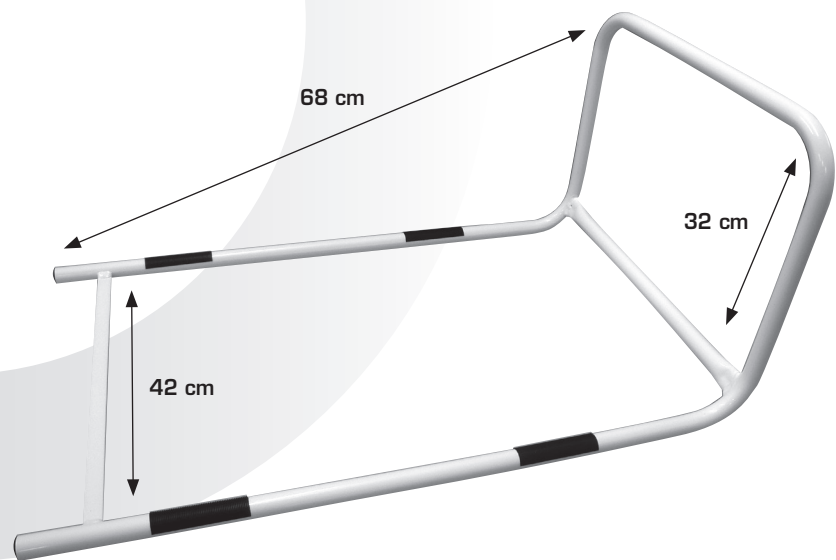

La barre latérale universelle de redressement permet le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit, en respectant un schéma moteur naturel. Elle est adaptable sur tous types de lit.

Fiche technique



Mémo PRATIQUE

	Pour la rééducation des patients atteints de régression psychomotrice, le patient doit saisir la barre avec la main distale au côté de sortie du lit puis exercer une poussée avec la main proximale pour s'asseoir. <ul style="list-style-type: none"> • Peut convenir pour des patients hémiplégiques ou atteints de paralysie. • On associe souvent la barre de lit avec un guidon de transfert.
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Saisir la barre de lit avec la main opposée. 2 Tracter sur la barre, faire pivoter les jambes vers l'extérieur. 3 Pousser sur la barre pour s'asseoir.
	Lit médicalisé : les sangles doivent enserrer le relèvements buste sans empêcher les fonctionnalités de ce dernier.
	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
	Déclaration CE de conformité. La barre de lit de redressement (Réfs : DEBARLI90 - DEBARLI140 - DEBARLI200 - DEBARLIXXL - DEBARCOUL90 - DEBARCOUL140 - DEBARCOUL200) est répertoriée dans les produits dits de « classe 1 » selon la directive européenne 93/42.



Principe général

La barre latérale universelle de redressement permet le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit en respectant le schéma moteur naturel.

Elle s'adapte à tous types de lit, elle cohabite parfaitement avec les barrières de lit et les fonctionnalités d'un relèvement buste.

Mise en place

Pour les barres de lit double (Réfs : DEBARCLIDOU*, DEBARLIDOU*), l'installation s'effectue lorsque le lit est inoccupé.

Lit médicalisé ou tout lit équipé d'un dossier relevable

(Réfs : DEBARLI90, DECLIBAR90, DEHAUBAR90, DEBARXXL, DEBARLIDOU*, DEBARCLIDOU*)

Redresser le dossier.

Glisser la barre de lit entre le relèvement buste et le matelas, au dessus du bassin du patient, à droite ou à gauche.

Pour solidariser la barre de lit, fixer une extrémité de la sangle velours Velcro sur la bande agrippante, entourer le relèvement buste du haut vers le bas avec la sangle velours Velcro qui s'accroche sur la bande agrippante opposée. Répéter la même opération pour le côté opposé.

Après l'installation, **vérifier** que les possibilités de montée et de descente du relèvement-buste sont respectées.

Lits traditionnels de largeur 90 à 140 cm maximum


(Réfs : DEBARLI140, DEHAUBAR140)

Glisser la barre de lit entre le sommier et le matelas, au dessus du bassin du patient, à droite ou à gauche.

Pour solidariser la barre de lit, entourer le sommier de gauche à droite avec la sangle et fermer les boucles. Répéter la même opération pour le côté opposé.


Notice de Montage

L'emballage de la barre latérale Canoli® contient

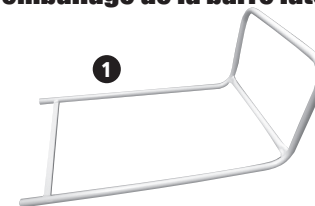

- Une barre métallique 1.
- Deux sangles auto-agrippantes femelles à « velours » 2 et quatre bandes adhésives auto-agrippantes mâles à « crochet » 3.

Ou ... Deux sangles en tissu 4 à boucles rigides

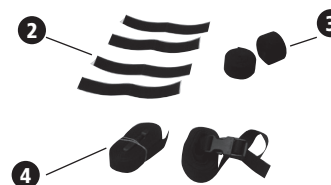

En Option : DEBARSAC

DEBARSAC est un vide-poches, 32 x 20 cm utiles, pose/dépose pratique et rapide par bandes auto-agrippantes.

Instructions de montage

Lit traditionnel de largeur 90

- 1 • Coller les quatre bandes adhésives auto-agrippantes 3 sur la barre métallique 1 aux emplacements repérés 5 (nettoyage préalable avec un tampon légèrement alcoolisé pour assurer un collage efficace)
- 2 • Glisser la barre métallique 1 entre le sommier et le matelas, au dessus du bassin du patient, à droite ou à gauche du lit.
- 3 • Solidariser la barre métallique en entourant le sommier avec les deux sangles « femelles » 2 (fixer les extrémités des sangles « mâles » 3 sur les bandes « mâles » 3).

Lit traditionnel de largeur 140 à 200

- 1 • Glisser la barre métallique 1 entre le sommier et le matelas, au dessus du bassin du patient, à droite ou à gauche du lit.

- 2 • Solidariser la barre métallique en entourant le sommier avec les deux sangles tissu 4.

Lit médicalisé ou lit équipé d'un dossier relevable

- 1 • Coller les quatre bandes adhésives auto-agrippantes 3 sur la barre métallique 1 aux emplacements repérés (nettoyage préalable avec un tampon légèrement alcoolisé pour assurer un collage efficace).
- 2 • Redresser le dossier.
- 3 • Glisser la barre métallique 1 entre le relèvement buste et le matelas, au dessus du bassin du patient, à droite ou à gauche du lit.
- 4 • Solidariser la barre métallique en entourant le sommier avec les deux sangles « femelles » 2 (fixer les extrémités des sangles « mâles » 3 sur les bandes « mâles » 3).
- 5 • Après montage, vérifier le bon fonctionnement du relèvement buste (montée et descente).